

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Центр творчества детей и молодежи»  
Алтайский край, г. Славгород

**СОГЛАСОВАНО:**

Первичная профсоюзная  
организация  
МБОУ ДО «ЦТДМ»  
Протокол от 28.07.2022 №05

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБОУ  
ДО «ЦТДМ»

\_\_\_\_\_ О.В. Фукс  
01.08.2022г.

**ИНСТРУКЦИЯ № \_\_\_\_\_  
по охране труда при эксплуатации обеззараживателя воздуха (рециркулятор)**

**1. Общие требования охраны труда**

- 1.1. Обеззараживатель (рециркулятор) предназначен для очистки воздуха в помещении.
- 1.2. Обеззараживателя можно включать в помещении с присутствием людей.
- 1.3. Персонал должен проходить обязательный предварительный при поступлении на работу и не реже одного раза в 12 месяцев периодические медицинские осмотры.
- 1.4. Персонал, обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха.
- 1.5. Запрещается:
  - пользоваться обеззараживателем лицам, не знакомым с руководством по эксплуатации;
  - применять обеззараживатель с механическими повреждениями;
  - проводить техническое обслуживание обеззараживателя, находящегося под напряжением;
  - эксплуатировать обеззараживатель с повреждённой изоляцией проводов.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. В процессе подготовки к эксплуатации следует проверить комплектность обеззараживателя и его внешний вид. Обеззараживатель визуально должен быть без повреждений.
- 2.2. Для начала эксплуатации обеззараживателя необходимо:
  - поместить обеззараживатель на сухую, ровную, горизонтальную плоскость;
  - убедиться, что для нормальной работы прибор находится на расстоянии не менее 20 см от стен или предметов, а верхний воздуховод не менее 30 см;
  - подключить обеззараживатель к розетке питания;
  - выбрать режим работы – выбор скорости воздуха и установка таймера от 1 до 8 часов.

**3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Во время работы обеззараживателя:
  - не перекрывать вход и выход воздуха;
  - не загромождать обеззараживатель посторонними предметами;
  - не позволять прибору соприкасаться с водой.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При появлении неисправности в работе обеззараживателя, появления искрения немедленно отключить его от электросети и сообщить об этом заведующему хозяйством.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить обеззараживатель от электросети, подать сигнал тревоги, вызвать пожарную охрану по телефону 01, сообщить руководителю и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3 При поражении человека электрическим током и прочих травмах освободить пострадавшего от действия электрического тока, оказать первую медицинскую помощь и по показаниям госпитализировать пострадавшего.

## **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. После окончания работы обеззараживатель необходимо отключить от сети.

5.2 Визуально осмотреть нет ли каких-либо повреждений.

5.3. Очистите корпус устройства мягкой сухой тряпкой, если загрязнение серьезное, используйте влажную тряпку, чтобы аккуратно протереть, но не используйте грубые материалы.

5.4. Очистите воздухозаборник и выпускное отверстие изделия, используя мягкую щётку для удаления пыли, скопившейся на воздухозаборнике и выпускном отверстии.

5.5. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных после окончания работы прибора, персонал обязан сообщить заведующему хозяйством.



